

Ficha Técnica

Válvula de exalação Whisper

Descrição Geral

A Whisper Swivel é uma válvula de exalação reutilizável, projetada para uso com sistemas de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) e ventilação mecânica. Ela permite a exalação eficaz do ar expirado pelo paciente, proporcionando uma terapia respiratória mais confortável e eficiente.

Especificações Técnicas

- **Modelo:** Whisper Swivel II
- **Código do Fabricante:** 332113
- **Registro ANVISA:** 10216710291
- **Compatibilidade:** Máscaras Contour, Gold Seal e profile Lite da Philips Respironics
- **Material:** Livre de látex e DEHP
- **Rotação:** 360 graus, permitindo liberdade de movimento
- **Reutilizável:** Sim, com capacidade para até 15 ciclos de desinfecção

Instruções de Limpeza e Desinfecção

Limpeza Diária:

1. Desconecte a válvula da máscara e da tubulação
2. Lave as peças manualmente com água morna e sabão neutro.
3. Enxague bem e deixe secar ao ar livre.
4. Inspeccione as peças para detectar resíduos ou danos antes de reutilizar



Desinfecção:

1. Desmonte a válvula pressionando as patilhas superiores para separar as duas peças
2. Imersa as partes em solução de glutaraldeído a 2,4% ou 2,5%, seguindo as instruções do fabricante da solução
3. Enxágue bem as peças conforme as instruções do fabricante ou com água corrente fria

Observações

- **Segurança:** Não utilize a máscara sem que o sistema de CPAP esteja ligado e funcionando corretamente, para evitar a reinalação de ar expirado, o que pode levar a asfixia em algumas circunstâncias.
- **Manutenção:** Substitua a válvula se houver sinais de desgaste ou danos após a inspeção