

FABRICANTE: POWERbreathe International – Reino Unido – Inglaterra		
REGISTRO ANVISA: 81001390003	NCM: 9019.20.90	
VALIDADE: 5 anos	GARANTIA: 24 meses	
SIMPRO: 178596	CÓDIGO DO PRODUTO: PB2001	
EAN DO PRODUTO: 5060127407880	CAIXA DE EMBARQUE: 10 unidades	

1 DESCRIÇÃO

O POWERbreathe foi adotado por profissionais da saúde como um aparelho de mecanoterapia para treinamento muscular respiratório. Por ser cientificamente comprovado para fortalecer os músculos inspiratórios, vêm sendo utilizado tanto como uma terapia individual ou em conjunto com a reabilitação pulmonar. Possui níveis de resistência ajustado por um conjunto de válvula e mola, de acordo com cada modelo, podendo ser ajustado manualmente.

O POWERbreathe Plus Medic é a 2ª geração da linha, é mais anatômico e leve, possui 10 níveis de ajuste. Produto para uso individual e possui bocal esterilizável.

É indicado para uso de terapia no tratamento de patologias respiratórias, como:

- Capacitador de treinamento funcional inspiratório;
- Portadores de DPOC (Doença pulmonar obstrutiva crônica);
- Insuficiência cardíaca;
- Asma;
- Pós-operatório de cirurgia torácica;
- Auxílio no desmame de ventilação mecânica;

- Tratamento da fibrose cística e da doença neuromuscular.

2 COMPOSIÇÃO

- Bocal: PVC sem látex;
- Válvula: Borracha de silicone;
- Anilha: Borracha nitrílica;
- Mola: Aço inoxidável;
- Tensor: Nylon reforçado 66;
- Bolsa de fecho: PVC;
- Corpo principal, câmara inferior, tampa, botão de ajuste de carga e mola para nariz: Polipropileno.

3 MODO DE USAR

- a) Encaixe do bocal nos lábios para realizar as sessões de treinamento;
- b) Realizar uma expiração esvaziando totalmente o pulmão. Para ganho de força, o padrão de inspiração deve ser rápido e prolongado, por 30 repetições 2 x ao dia;
- c) Em paciente debilitado orientamos o exercício por um tempo determinado, respirando tranquilamente;
- d) Tornando-se fácil o exercício, basta ajustar o nível que aumentará a carga.

4 LIMPEZA

- O equipamento é completamente lavável;
- A higiene pode ser realizada utilizando detergente neutro e água corrente;
- Pastilhas higienizadoras próprias da marca ou as comercializadas para higienização de mamadeiras;
- Hipoclorito de sódio a 1%.

5 ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em local fresco e seco, ao abrigo da luz.

6 CONTRAINDICAÇÕES

O POWERbreathe não é recomendado para:

- Pacientes com antecedentes de pneumotórax espontâneo;
- Tímpano rompido;
- Osteoporose grave;
- Asmático com baixa sensação de sintoma.

7 DIMENSÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Peso: 149g;
- Dimensões: 15,5 cm x 16,5 cm x 7 cm (A x L x P);
- Nível de esforço: leve;
- Carga liberada: 17 a 98 cmH₂O.

Níveis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Carga liberada	17	25	33	41	49	58	66	74	82	90	98
	cmH ₂ O										

8 CONTÉM

- POWERbreathe Plus LR;
- Clip nasal;
- Bolsa protetora;
- Manual do usuário.