




**1** Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".

Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:

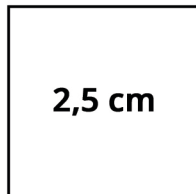

**2** Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações.

**3** Experimente cada molde de almofada no nariz e escolha o menor tamanho de almofada que não fique obstruindo as laterais do nariz ou os olhos.



**Mirage Micro™**  
**Mirage Activa™ LT**  
**Mirage™ SoftGel**

**Tamanho Pequeno (S)**  
 Altura: 4,0 cm  
 Largura: 3,8 cm

**Tamanho Médio (M)**  
 Altura: 4,7 cm  
 Largura: 4,2 cm

**Tamanho Grande (L)**  
 Altura: 4,8 cm  
 Largura: 4,5 cm

**Tamanho Grande largo (LW)**  
 Altura: 4,3 cm  
 Largura: 4,8 cm

(somente Mirage Micro)  
**Tamanho Extra grande (XL)**  
 Altura: 4,3 cm  
 Largura: 5,2 cm